



1 Présentation du stéthoscope



2 Utilisation du stéthoscope

2.1 Fonctionnement avec la plateforme Therap-e

1. Vérifier que le stéthoscope est branché sur la « carte son » USB de l'ordinateur grâce au câble audio
2. Allumer le stéthoscope en appuyant sur le bouton On/Off
3. Se connecter à la plateforme Therap-e
4. Cliquer sur l'onglet « salle » puis sur « Entrer dans une salle » pour démarrer la visioconférence
5. Cliquer sur le bouton stéthoscope à gauche de l'écran pour entendre le son du stéthoscope 
6. Appuyer sur l'indicateur de filtres sur le stéthoscope pour sélectionner « cœur » ou « poumon » ou les 2
7. Cliquez de nouveau sur le bouton stéthoscope pour revenir au son de la visioconférence 

Pour recharger le périphérique, le brancher avec le câble micro USB fourni.