




Pour télécharger l'application, rendez-vous sur Play Store  et télécharger **Therap-e** 

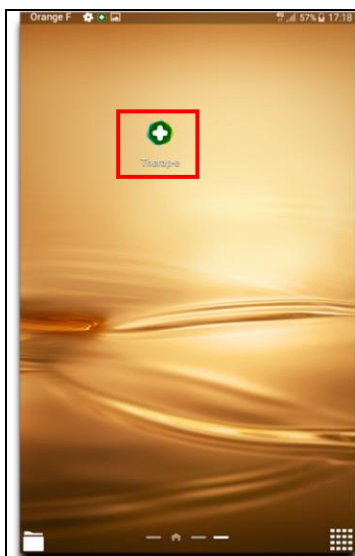


1 – Démarrer l'application Therap-e en appuyant sur l'icône Therap-e

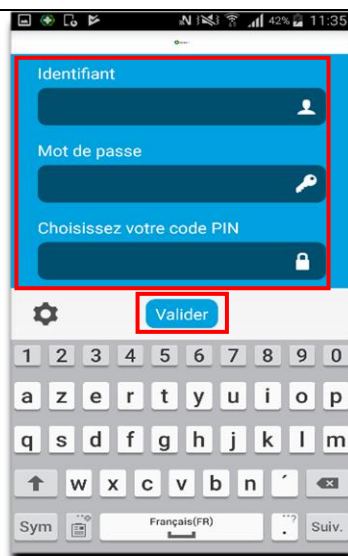

2 – Pour la 1ère connexion, renseigner l'**identifiant** et le **mot de passe** puis choisir un **code PIN** (différent de 0000 ou 1234), puis **Valider NB** : Il est nécessaire d'avoir du réseau pour votre 1ère connexion à l'application

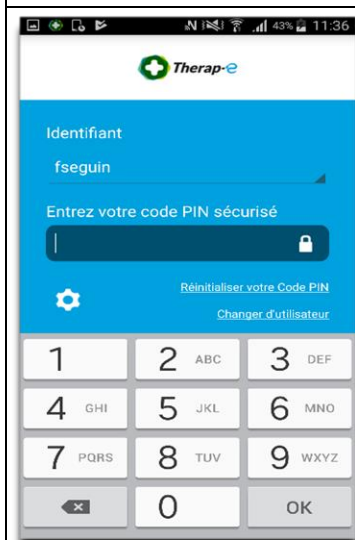


2 bis – Pour les connexions suivantes, l'application demandera uniquement le code PIN (renseigné lors de la 1ère connexion)

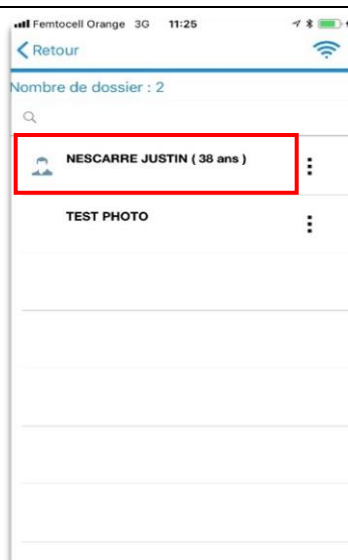



3 – Sélectionner le dossier du patient concerné



4 – Cliquer sur  pour accéder au menu de prise de photo



5 – Cliquer sur 

NB : si la photographie a déjà été prise, la rechercher dans le téléphone, en appuyant sur 

Puis passer à l'étape **8**




6 – L'appareil photo est activé
Prendre une photographie de la plaie

Quand la photographie est satisfaisante, « valider »



7 – Cliquer sur « Réessayer » pour remplacer la photo non satisfaisante (puis valider)

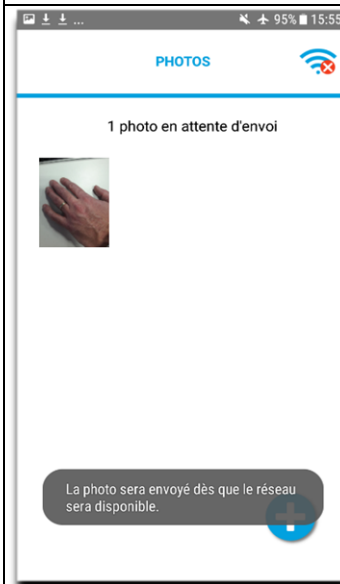

8 – Lorsqu'il n'y a pas de réseau, les photographies se placent en attente d'envoi

Elles seront transmises automatiquement à l'infirmière experte dès que le smartphone aura du réseau (3G/4G/Wifi)




9 – Lorsque les photos sont envoyées, une notification le confirme


Il n'y a alors plus de photos en attente d'envoi




10 – En cas de téléconsultation, une invitation est envoyée par l'infirmière experte.

Appuyer sur **ACCEPTER** pour entrer en salle

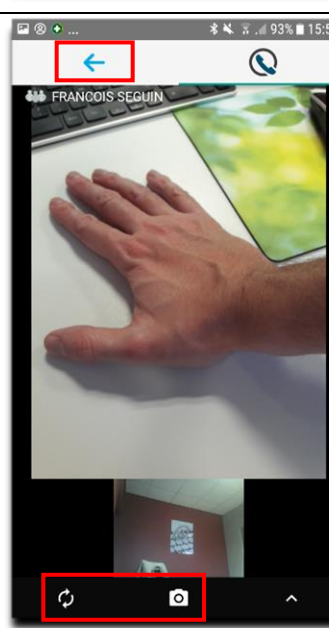

11 – Choisir  pour changer de caméra

Sélectionner  pour prendre une photographie (puis suivre les étapes de **6** à **7**)

Enfin, sélectionner  pour quitter la salle